



Istruzioni di sicurezza e pulizia per il tiralatte LIINI®

Gentile cliente,

grazie per aver scelto il nostro tiralatte. Attribuiamo grande importanza alla vostra sicurezza e al benessere della vostra famiglia.

Per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo, è importante seguire attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e pulizia. Un uso improprio può comportare gravi rischi!

Manuale / Istruzioni per l'uso

Abbiamo scelto consapevolmente di non fornire manuali di istruzioni cartacei, risparmiando così diverse tonnellate di carta ogni anno. Allo stesso tempo, possiamo aggiornare il nostro manuale di istruzioni elettronico in qualsiasi momento, in modo che abbiate sempre a disposizione la versione più recente.

Anche se molte funzioni sono intuitive, ti invitiamo a dedicare **5 minuti alla lettura delle istruzioni**. È importante utilizzare il prodotto secondo le istruzioni per l'uso, in modo da poterlo apprezzare a lungo, garantire il corretto funzionamento di tutte le funzioni ed evitare inutili inconvenienti.

Puoi trovare le **istruzioni per l'uso** tramite il seguente **codice QR** (da scansionare con lo smartphone):



Disponibile online: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Informazioni generali

Produttore	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Svizzera
Contatto	compliance@liini.ch
Paese di origine	Cina (CN)
Certificazioni	CE, RoHS
Rappresentante autorizzato UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Paesi Bassi (solo autorità)
Numero di registrazione WEEE (DE)	74241330 Fondazione Registro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Nordostpark 72 90411 Norimberga
Numero di registrazione WEEE (AT)	9008392342860 Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Vienna
Numero di registrazione WEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Numero di registrazione WEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Avvertenze generali di sicurezza (GPSR)

Il trasporto improprio del bambino può causare gravi incidenti e lesioni e comporta **seri rischi per la sicurezza**.

Si prega di osservare attentamente le seguenti indicazioni:

- Utilizzare il tiralatte LIINI® esclusivamente secondo le istruzioni riportate nel presente manuale.
- Il prodotto è destinato esclusivamente allo scopo previsto, ovvero l'estrazione del latte materno.
- Il tiralatte non è un giocattolo e non deve essere utilizzato o pulito dai bambini.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che tutti i componenti non presentino danni. Non utilizzare il dispositivo se alcune parti sono danneggiate, deformate o montate in modo non corretto.
- Utilizzare esclusivamente i componenti e gli accessori forniti o previsti da LIINI®.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore, malessere o reazioni insolite.

Istruzioni per l'uso

- Assicurarsi che il tiralatte sia assemblato correttamente prima di metterlo in funzione.
- Scegliere sempre un livello di intensità confortevole. Una forza di aspirazione eccessiva può essere fastidiosa.
- Il tiralatte non deve essere utilizzato durante il sonno.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si guida o si svolgono attività che richiedono la massima attenzione.
- Il tiralatte non è impermeabile. Tieni l'unità elettrica lontana da acqua e umidità.

Indicazioni relative alla batteria e alla ricarica

- Si prega di caricare il tiralatte esclusivamente tramite la **porta USB-C** prevista a tale scopo.
- Utilizzare solo alimentatori adeguati con potenza di uscita corrispondente.
- Si prega di non lasciare il dispositivo in carica incustodito e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il tiralatte durante il processo di ricarica.
- Non esporre la batteria a temperature estreme, alla luce diretta del sole o a fiamme libere.



Istruzioni per la pulizia

- Pulire tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo.
- Smontare completamente il tiralatte prima della pulizia.
- Le parti a contatto con il latte (ad es. cuscinetti in silicone, valvole, contenitori per il latte materno) possono essere pulite con acqua calda e detersivo delicato, bollite o sterilizzate con altri accessori per neonati (secondo le normali raccomandazioni).
- L'unità elettrica non deve essere immersa in acqua né pulita sotto l'acqua corrente.
- Pulirla esclusivamente con un panno asciutto o leggermente umido.
- Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di rimontarli o riporli.

Conservazione

- Conservare il tiralatte in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il prodotto a umidità prolungata o alla luce diretta del sole.

Informazioni sulla direttiva WEEE 2012/19/UE

Significato del simbolo del bidone della spazzatura barrato



Tutti i nostri dispositivi elettronici (scaldabiberon, scaldapappa, dispositivi per favorire il sonno) sono contrassegnati dal simbolo del bidone della spazzatura barrato.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che **sei tenuto per legge** a smaltire questi dispositivi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati, ovvero i dispositivi usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o gli accumulatori non fissati in modo permanente devono essere rimossi prima dello smaltimento e smaltiti separatamente.

Tutte le batterie ricaricabili dei nostri prodotti sono fisse, pertanto è possibile **smaltire** i prodotti **nella loro interezza**.

Una barra sotto il bidone della spazzatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Possibilità di restituzione dei vecchi apparecchi (direttiva RAEE 2012/19/UE)

I proprietari di apparecchiature usate possono consegnarle nell'ambito delle possibilità di restituzione o raccolta di apparecchiature usate istituite e messe a disposizione dagli enti di smaltimento di diritto pubblico, al fine di garantire uno smaltimento corretto.

Dati personali (direttiva RAEE 2012/19/UE)

Si informano tutti gli utenti finali di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate che sono responsabili della cancellazione dei dati personali presenti sugli apparecchi usati da smaltire.



Informazioni sulla direttiva sulle batterie 2006/66/CE

Di seguito, ogni riferimento a batterie o accumulatori si intende riferito a batterie o accumulatori usati.

Significato del simbolo del bidone della spazzatura barrato (direttiva sulle batterie 2006/66/CE)

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che si è tenuti per legge a smaltire le batterie o gli accumulatori separatamente dai rifiuti urbani non differenziati, ovvero che devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Se le batterie o gli accumulatori contengono più dello 0,0005% in peso di mercurio, più dello 0,002% in peso di cadmio o più dello 0,004% in peso di piombo, sono contrassegnati con i simboli chimici dei metalli (Hg, Cd, Pb) per i quali è stato superato il valore limite.

Possibilità di restituzione delle batterie o degli accumulatori (direttiva sulle batterie 2006/66/CE)

I proprietari di batterie o accumulatori possono restituirli gratuitamente dopo l'uso nell'ambito delle possibilità di restituzione o raccolta di batterie o accumulatori istituite e messe a disposizione dagli enti pubblici di smaltimento dei rifiuti o direttamente nei negozi, al fine di garantire un corretto smaltimento.

Misure di prevenzione dei rifiuti e misure per evitare l'abbandono dei rifiuti (Direttiva sulle batterie 2006/66/CE)

Ridurre il più possibile la produzione di rifiuti derivanti dalle batterie utilizzando batterie con una durata maggiore o accumulatori ricaricabili. Non abbandonare le batterie o gli apparecchi elettrici ed elettronici alimentati a batteria, evitando così l'inquinamento dell'ambiente, a tutela dei nostri figli.

Possibilità di preparazione per il riutilizzo delle batterie usate (Direttiva sulle batterie 2006/66/CE)

Valutare la possibilità di riciclare le batterie usate.

Possibili effetti delle sostanze contenute nelle batterie sull'ambiente e sulla salute umana (Direttiva sulle batterie 2006/66/CE)

Le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze che hanno possibili effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. In particolare, le batterie al litio devono essere maneggiate con cautela a causa dei rischi specifici che comportano, come il pericolo di incendio o il rischio di ingestione nel caso delle batterie a bottone.

Importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio (Direttiva sulle batterie 2006/66/CE)

La raccolta differenziata e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori contribuiscono in modo significativo alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione dei rischi per la salute.